

# SPURTEX®

## DEZINFEKCE NANOVLÁKENNÝCH PRODUKTŮ

Dezinfece SPURTEX® je kapalný dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený široké veřejnosti pro jednorázovou i opakovanou dezinfekci nanovlákených roušek a respirátorů.

- I K dezinfekci nano roušek a respirátorů SPURTEX®
- I Vhodná i na ruce
- I Účinná a okamžitá deaktivace virů a bakterií
- I Umožňuje opakování použití nano roušek a nano respirátorů SPURTEX® až 5x
- I Šetří peníze a přírodu
- I Bez zápachu



nastříkejte 2–3x  
z každé strany



24 hodin nechte  
schnout



tento proces lze  
zopakovat až 5x



účinná  
deaktivace  
virů a bakterií

OKAMŽITÝ  
ÚČINEK



česká  
výroba

### Návod k použití

1. Před dezinfekcí roušky/respirátoru a bezprostředně po ní si důkladně umyjte ruce a použijte na ně dezinfekci SPURTEX®.
2. Všechny části roušky/respirátoru rovnoměrně a po celé ploše postříkejte dezinfekcí. Aplikujte 2-3 stříky z obou stran ze vzdálenosti cca 15 cm.
3. Poté nechte roušku/respirátor uschnout a vyvětrat na vzduchu při pokojové teplotě ideálně 24 hodin, nejméně však přes noc.
4. Po důkladném vysušení lze roušku/respirátor znovu použít.
5. Tento postup lze opakovat až 5x.

### Doplňující informace:

Roušku/respirátor je vhodné dezinfikovat po každém použití (pokud tato možnost existuje). Lahvičku s dezinfekcí před použitím důkladně protřepejte. Kvůli omezení rizika nadýchání zbytku alkoholových výparů neaplikujte postřík na nasazenou roušku/respirátor. K sušení se nedoporučuje používat sušičku, mohlo by dojít k mechanickému poškození filtrační vrstvy. Dále se nedoporučuje zvýšené tepelné namáhání roušky/respirátoru prostřednictvím mikrovlnné trouby nebo fénů. K dezinfekci roušky/respirátoru lze využít různé prostředky jako jsou ethanol, isopropanol. Světová zdravotní organizace (WHO) doporučuje využití k dezinfekci alkohol o koncentraci 70 až 90 %. Společnost SPUR a.s. nabízí dezinfekční prostředky na alkoholové bázi UNISANOL. Dezinfekce UNISANOL ovlivňuje pouze estetickou formu (vzhled), nemá vliv na funkčnost filtračního materiálu.



Dodavatel:

SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
tel.: +420 577 601 112 | e-mail: spurtex@spur.cz |  
www.spur.cz | eshop.spur.cz



Výrobce:  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
(receptura Unisanol – reg. č. MZDR 17099/2020/OBP).